

## Limpieza del Sistema

### Advertencia



- Antes de proceder a limpiar la consola, apáguela y desconéctela de la toma de corriente.
- Mantenga las zonas eléctricas protegidas de los líquidos.

### Precaución



En la tabla siguiente se muestran las instrucciones de limpieza del aparato de ultrasonidos. Es responsabilidad del usuario decidir el procedimiento de limpieza necesario para conseguir un entorno de trabajo seguro.

- No se deben limpiar los contactos y conectores eléctricos.
- Utilice únicamente los agentes de limpieza que se indican en la siguiente tabla.
- No utilice alcohol en altos porcentajes (más del 70% ) para limpiar el sistema.
- Si utiliza un spray, aplíquelo en un paño y páselo por el sistema. No aplique el spray directamente en el sistema para evitar la penetración de líquidos.
- El paño debe estar húmedo no sobresaturado del líquido. Esto para no dañar los componentes del equipo.

### Limpieza

- Realice la limpieza comenzando desde la parte más alta hasta la más baja del equipo.
- Tenga en cuenta las temperaturas y los tiempos de exposición recomendados por el fabricante del agente de limpieza.
- En caso de existir mucha contaminación, limpie previamente con un paño húmedo.
- Puede eliminar los agentes de limpieza residuales pasando un paño húmedo no abrasivo.

Tabla de limpiadores y su aplicación en partes y piezas.

Componente	Soporte de sondas	Interfaz del usuario	Panel táctil	Monitor	Cubiertas	Transductores
CaviWipes	X	X	X	X	X	X
Cleanisept Wipes forte	X	X	X	X	X	X
Clinell Universal Sanitising wipes	X	X	X	X	X	X
Clorox Healthcare Hydrogen Peroxide Cleaner	X	X	X	X	X	X
Optim 33TB Wipes	X	X	X	X	X	X
PCS 1000 Oxidizing Disinfectant cleaner wipes	X	X	X	X	X	X
Protex disinfectant wipes	X	X	X	X	X	X
Reynard Premier Disinfectant Wipes	X	X	X	X	X	X
Sani-Cloth AF3 Germicidal Disposable Wipe	X	X	X	X	X	X

### Desinfección

- La desinfección eficaz es siempre un equilibrio entre la desactivación segura de agentes infecciosos y efectos secundarios no deseados.

Debido a la superficie a menudo desigual e irregular de las consolas de ultrasonido, el fabricante no puede recomendar un proceso de desinfección completa de superficies. Por tanto, el usuario debe determinar el alcance y la frecuencia de la desinfección para el.

### Listado completo de desinfectantes, marca y tipo autorizados por GE Healthcare.

Nombre	Marca	Tipo
CaviWipes	Metrex	Wipes
Cleanisept Wipes forte	Dr.Schumacher GmbH	Wipes
Clinell Universal Sanitising wipes or Clinell Universal wipes	GAMA Healthcare Ltd	Wipes
Clorox Healthcare Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant wipes	Clorox Pro	Wipes
Optim 33TB Wipes	SciCan	Wipes
PCS 1000 Oxidizing Disinfectant cleaner wipes	Process Cleaning Solutions Ltd	Wipes
Protex disinfectant wipes	Parker Laboratories Inc.	Wipes
Reynard Premier Disinfectant Wipes	Reynard Health Supplies	Wipes
Sani-Cloth AF3 Germicidal Disposable Wipe	PDI	Wipes