

## **Protocolo de Limpieza y Desinfección Equipos Médicos**

### **COVID-19**

El siguiente es un protocolo de limpieza que corresponde a la contingencia actual para poder mantener los equipos médicos (rayos x, grabadores de CD, impresoras y digitalizadores) desinfectados para así evitar de la mejor manera el contagio del COVID-19. Les sugerimos realizar estos procedimientos periódicamente y siempre que sea necesario.

Mantenimiento y limpieza de equipos médicos:

- La utilización de guantes mascarillas y protección ocular es muy deseable
- Se debe realizar la limpieza en una zona lejos de otras personas
- Productos y agentes de limpieza:
  - o Paños con cloro (consolas equipos de RX y mamografía)
  - o Alcohol isopropílico 73% y 95% (Impresoras y Grabadores de discos)
  - o En el caso de no contar con productos específicos de limpieza de equipos, se recomienda disolver 3 cucharadas de cloro en un litro de agua
- Tener siempre la precaución de que el paño que se utilice para limpieza de equipos nunca debe gotear, se debe deshacer del exceso de líquido ya que este se puede filtrar a tarjetas electrónicas causando una falla mayor.
- El equipo debe estar apagado y sin conexión a una fuente eléctrica
- Se debe contar con varios paños con el agente de limpieza para lograr un trabajo eficaz
- Pasar el paño suavemente sobre las tapas de los equipos
- En el caso de limpieza de pantallas, mirar a contraluz para asegurar que la limpieza ha sido efectiva y que no han quedado rastros del agente de limpieza
- La limpieza de teclados se debe hacer con paño húmedo, si gotear, haciendo hincapié en limpiar sobre y entre teclas.
- Los desechos deben ser colocados en una bolsa plástica y llevados por la persona que ha limpiado el equipo hacia una zona de manejo de desechos
- Evitar intoxicación de cualquier tipo con los agentes de limpieza
- Seguir siempre las instrucciones de la autoridad sanitaria

Se solicita seguir los pasos cada vez que sea necesario y siempre que nuestros técnicos de servicio realicen mantenencias preventivas o correctivas.